

POSITIONERINGSMODELLEN

POSITIONERINGSMODELLEN

DECUBITUS PREVENTIE EN BEHANDELING


Decubitus ontstaat door druk en / of door schuif en wrijfkrachten. Een complexe wisselwerking tussen intrinsieke en externe factoren van de zorg behoevende cliënt spelen hierin een belangrijke rol. CARE10 levert een totaal concept aan matrassen, systemen en hulpmiddelen die van waarde kunnen zijn bij preventie en behandeling van decubitus.

HET CARE10 POSITIONERINGSCONCEPT

Het CARE10 positioneringsconcept bestaat uit een assortiment kussens & modellen ter ondersteuning van MANUELE positionering. Daarnaast bieden wij een uniek systeem waarmee op volledig automatische wijze de zorg behoevende cliënt van wisselgeving voorzien wordt. Dit geheel zonder fysieke- en tijdsbelasting van de zorgprofessional. Het systeem heeft diverse programma's en instellingsmogelijkheden wat afgestemd kan worden op de situatie van de cliënt.

ERGOTHERAPEUTEN & DECUBITUSSPECIALISTEN

Effectief, Eenvoudig en Comfortabel zijn de uitgangspunten voor al onze producten. Aangestuurd door onze duidelijke visie dat het door de zorg zelf geïnitieerde meerwaarde moet bevatten. Onze positioneringsmodellen zijn mede ontwikkeld door ergotherapeuten en decubituspecialisten. Het is op basis van hun kennis en expertise waaraan wij onze nauwe aansluiting met de zorg behoeften danken.

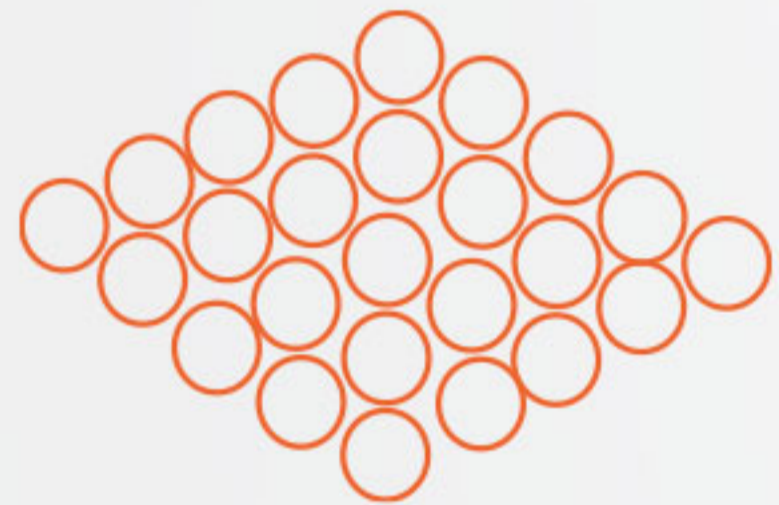

MICRO POLYSTYREEN KORRELS

De CARE10 positioneringskussens zijn gevuld met de kleinste micro polystyreen korrels. In combinatie met het 4 – zijden stretch polyurethaan materiaal bevordert dit de mogelijkheden van juiste en benodigde modellering als ook de duurzaamheid van de kussens in zijn algemeenheid.



4 – ZIJDEN STRETCH POLYURETHAAN

Alle modellen zijn gemaakt van 4 – zijden stretch polyurethaan. Deze kwalitatief hoogwaardig stof is hetzelfde materiaal als wordt gebruikt voor matrashoezen in de medische markt.



INCONTINENTIE BESTENDIG

Het 4 – zijden stretch Polyurethaan materiaal is incontinentie bestendig. Het voorkomt dat vocht en lichaamsvloeistoffen het positioneringsmodel binnen kunnen dringen.



HOEZEN MET ANTI BACTERIËLE BEHANDELING

Voor alle positioneringsmodellen zijn hoezen verkrijgbaar. Deze zijn uitgevoerd in een stevige Jersey stof die zowel zacht als comfortabel aanvoelt. De Jersey stof is voorzien van de anti bacteriële behandeling PuroTex en is uitwasbaar op 60 graden.

Hoezen hebben een hotelsluiting



HIEL KUSSEN

80 x 55 cm

Kussen met vijf banen waarvan de laatste baan het hoogst is, waar de hielen op geplaatst worden om deze vrij te leggen. Een favoriet model bij decubitusspecialisten gezien de effectiviteit, eenvoud en het comfort voor de cliënt.




Bed hoeslaken past over dit kussen

ONTWIKKELD MET
ERGOTHERAPEUTEN

KNIE KUSSEN

90 x 70 cm of 90 x 55 cm

Een stevig, stabiel kussen voor plaatsing onder de knieholten van de cliënt met als doel de hielen vrij te leggen. Afhankelijk van de lichaamslengte van de cliënt kan voor 70 of 55 cm lengte gekozen worden.

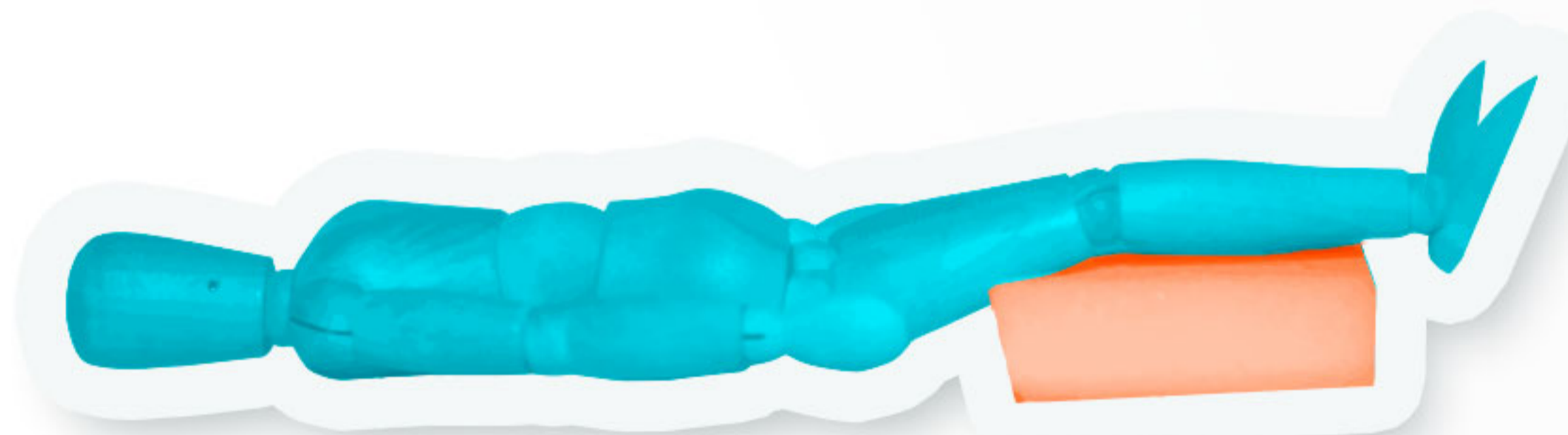

Kussen kan ook worden aangewend als stevige rugsteun

SLANGEN KUSSEN

170 x 30 cm


Door de unieke vormgeving is ondersteuning van verschillende lichaamsdelen tegelijkertijd mogelijk. Een geliefd model bij ervaren ergotherapeuten.



BOEMERANG KUSSEN

190 x 35 cm


Voorgevormd kussen ter ondersteuning van hoofd, nek, bovenkant rug en armen.

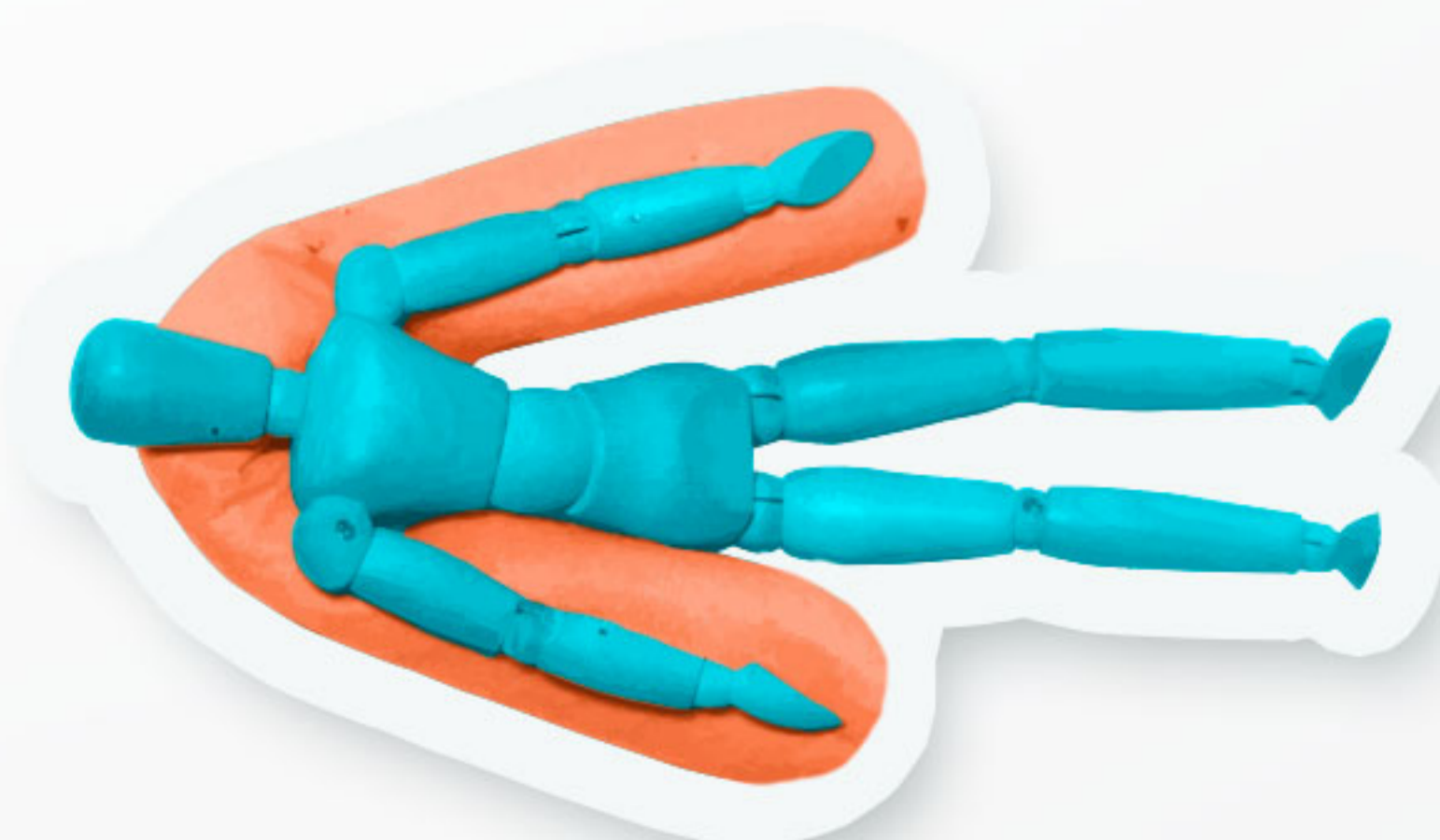

MULTI FUNCTIONEEL KUSSEN

60 x 30 cm (andere formaten opvraagbaar)

Kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt zoals tussen de knieën, onder de armen / ellebogen en als steun in de rug.

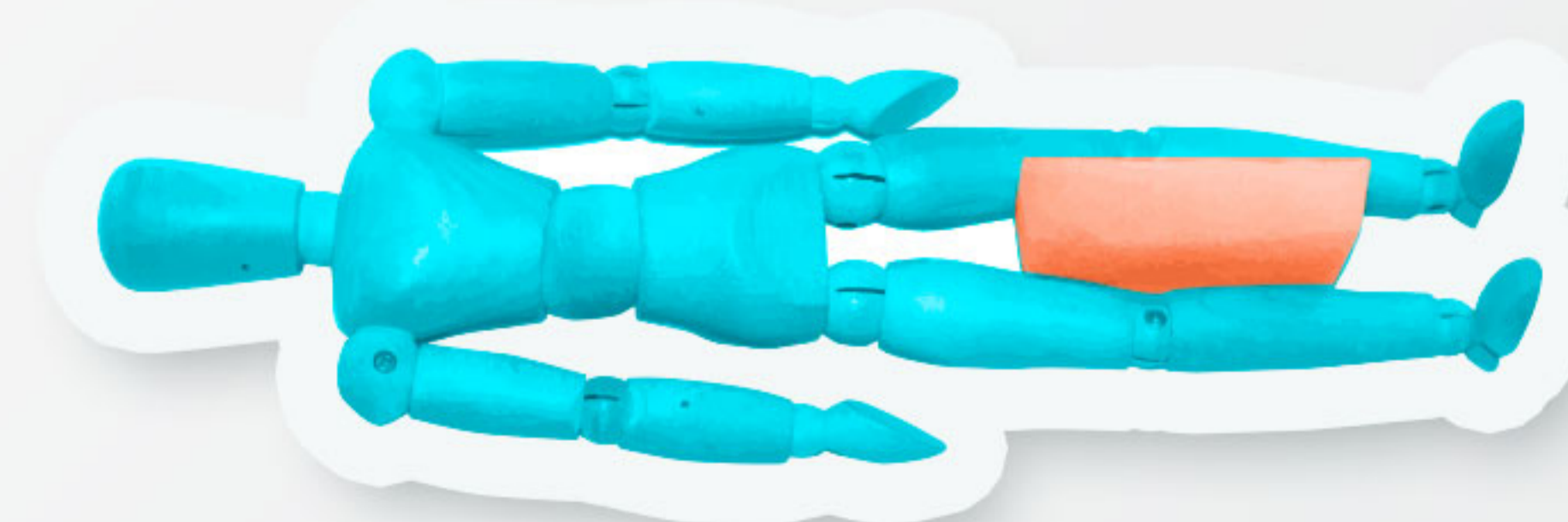

EKAMOVE

Automatisch positionering systeem

Het Ekamove systeem voorziet de zorgbehoevende cliënt volledig automatisch van wisselgigging, zonder fysieke belasting van cliënt en zorgprofessional.

Verschillende programma opties, instelbaarheid aantal graden en frequentie van gewenste wisselgigging maken een instelling mogelijk die zo nauw mogelijk aansluit op de individuele situatie van de cliënt.



Ekamove pomp

MODEL	ARTIKELOMSCHRIJVING POSITIONERINGSMODEL	ARTIKELCODE POSITIONERINGSMODEL	ARTIKELCODE BIJBEHORENDE HOES
	Hielkussen, 5 banen 80 x 55 cm	9911 0505	9911 0602
	Kniekussen maat L 90 x 70 cm	9910 0505	9910 0602
	Kniekussen maat M 90 x 55 cm	9917 0505	9917 0602
	Slangenkussen, 170 x 30 cm	9913 0505	9913 0602
	Boemerangkussen 190 x 25 cm	9912 0505	9912 0602
	Multifunctioneel kussen, 60 x 30 cm	9915 0505	9915 0602
	Spreidingskussen, 36 x 30 x 12 cm	9972 0505	9972 0602
	WIG kussen, 30 graden 45 cm breed	5705 1505	5705 0602

HEEFT U NOG AANVULLENDE MODELLEN WENSEN?

We leren graag van uw expertise en ervaring ter ontwikkeling van ons manuele positioneringsassortiment!

Voor meer informatie neem contact op met CARE10



Tel: +31 (0)418 65 35 69
Email: info@CARE10.eu
www.CARE10.eu

Steenweg 58
4181 AM
Waardenburg